

Module de chambre
avec boutons-
poussoirs
d'appel et de
présence
2920 ..

GIRA

Système d'appel 834

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systèmes d'installation
électrique
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Boîte postale 12 20
42461 Radevormwald
Allemagne
Tél. +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-399
www.gira.de
info@gira.de

410935100 / 15.06.2009

Consignes de sécurité

En cas de non-respect des indications de ce manuel, il y a danger de détérioration de l'appareil, d'incendie ou d'autres dangers.

Ce manuel fait partie du produit et doit rester chez les utilisateurs.

Etendue de la livraison

Module de chambre avec boutons-poussoirs d'appel et de présence (référence 2920 ..) pour montage dans une boîte d'encastrement.

Veillez tenir compte des indications d'installation détaillées du mode d'emploi d'ensemble, disponible sous:

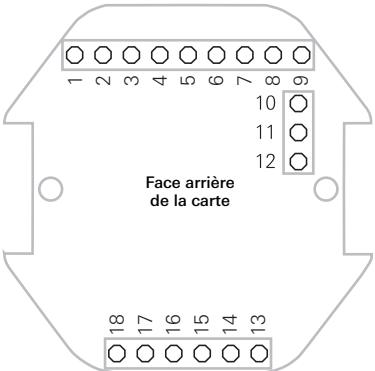
www.download.gira.de

Garantie

Nous accordons une garantie dans le cadre des stipulations légales.

Veillez envoyer l'appareil franco de port avec une description du défaut via le commerce spécialisé à notre service après-vente central:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Allemagne

Vue de l'appareil	Affectation des broches
 <p>Face arrière de la carte</p>	<p>Alimentation</p> <p>6 GND Masse 7 GND Masse 8 + 24 V Tension d'alimentation 9 + 24 V Tension d'alimentation</p> <p>Bus de groupe</p> <p>4 GBUS- Ligne de données (-entrée) 5 GBUS+ Ligne de données (+sortie)</p> <p>Zone WC</p> <p>18 + 24 V_out Tension (sécurisée) 15 RTWC Touche d'appel WC 16 RLWC Lampe d'appel WC 17 ATWC Touche d'arrêt de l'appel WC</p> <p>Lampe de signalisation de chambre</p> <p>18 + 24 V_out Tension (sécurisée) 1 AL1 Lampe de présence verte 2 RL Lampe d'appel rouge 3 RLWC Lampe d'appel zone WC blanche</p> <p>Chambre</p> <p>18 + 24 V_out Tension (sécurisée) 10 SU Bruiteur (sortie) 11 AT Touche de présence 12 AL LED dans la touche de présence 13 RT Touche d'appel (entrée) 14 RL LED dans la touche d'appel</p>
<p>Raccordement à: Raccordement de:</p>	<p>Bus de groupe Lampes de signalisation de chambre, bouton-poussoir d'appel, bouton-poussoir d'appel avec contact à fiche de connexion secondaire, bouton-poussoir à tirette et bouton-poussoir d'appel pneumatique, bouton-poussoir d'arrêt, appel WC.</p>
<p>Indication:</p>	<p>Fermer JP 1 pour le dernier participant au bus.</p>
<p>Informations complémentaires:</p>	<p>Câblage des composants de déclenchement d'appel, voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage des composants de désactivation d'appel, voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage dans la chambre, voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage dans la zone de WC (salle d'eau), voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage des participants au bus de groupe, voir mode d'emploi d'ensemble. Description de la fonction de retransmission d'appel, voir mode d'emploi d'ensemble.</p>